

# INTERACRYL PLAST

IA/2463

- (SI) Navodila za uporabo / (GB) Directions for use  
(D) Gebrauchsanweisung / (HR) Uputa za korištenje  
(RUS) Инструкции по использованию / (MK) Препорака за употреба  
(CZ) Návod na zpracování / (ES) Instrucciones de uso  
(KZ) Пайдалану бойынша нұсқаулық / (GR) Διαδικασία επεξεργασίας  
(RO) Instrucțiuni de utilizare / (ALB) Pergatitja

## CZ

INTERDENT s.r.o.  
Foerstrova 12, Strašnice  
CZ-10000 Praha  
T: +420/274 783 114  
F: +420/274 820 130  
E: interdent@interdent.cz

## HR

INTERDENT d.o.o  
Vinogradski odvojak 2d  
HR-10431 Sveta Nedelja  
T: +385/1 3873 644  
F: +385/1 38736 17  
E: interdent@interdent.hr

## SK

INTERDENT SK, s.r.o.  
Líščie údolie 57  
SK-84231 Bratislava  
T: 00421 2 5440554,  
F: 00421 2 5440555  
E: interdent@interdent.sk

## SRB

INTERDENT d.o.o.  
Zemunska 22, lok 3  
RS-11070 Novi Beograd  
T/F: +381/11 217 53 74  
www.interdent-bg.com



**INTERDENT®**

Proizvajalec/Producer/Hersteller  
Interdent d.o.o. · SI - 3000 CELJE · Opekarniška cesta 26  
T: +386 (0)3 425-62-00 · F: +386 (0)3 425-62-02  
E: info@interdent.cc · www.interdent.cc



**CE**

Verzija: 06/2018

Datum: 05.03.2018

Made in Slovenia

## **INTERACRYL PLAST**

**RUS**

(самополимеризующаяся акрилатная масса)

Interacryl plast – самополимеризуемая искусственная масса без содержания кадмия. Двухкомпонентный акрилат, состоит из полимера - порошка и мономера-жидкости. Окрашенный компонент полимер, мономер - бесцветный.

### **Индикации:**

- Производство индивидуальных ложек

### **Противопоказания:**

- НЕ для изготовления съемных протезов
- НЕ для использования в ортодонтии.

### **Инструкции по применению:**

#### **Соотношение смеси при комнатной температуре:**

**Соотношение смеси: 33,6 г порошок / 8 мл жидкости (4,2 г порошка / 1 мл жидкости)**

Жидкость залить в силиконовый сосуд, добавить необходимое количество порошка и оба компонента смешивать (90 сек.), до тех пор, пока масса не станет однородной и не будет оставаться на стенках сосуда. Готовую однородную массу наносить на гипсовую модель, изолированную Isoacrylom. Время обработки материала в пластической фазе 6 минут. Сформированная оттискная ложка из Interacryla самоотверждается при комнатной температуре в течение 12 минут. Для достижения оптимальной полимеризации и формы индивидуальной оттискной ложки, необходимо погрузить ее приблизительно на 4 минуты в воду, нагретую до 60°C.

### **Внимание:**

Не смешивать полимер (порошок) с мономером (жидкость) других поставщиков и наоборот.

### **Опасно:**

Легко воспламеняющаяся жидкость и пары. / Может вызвать раздражение дыхательных путей. / Вызывает раздражение кожи. / Может вызвать аллергическую реакцию на коже. / Вызывает сильное раздражение глаз. / Хранить вдали от источников тепла, искр, горячих поверхностей, открытого огня. - Не курить. / Хранить контейнер плотно закрытым. / Не вдыхать пары. / При контакте с кожей, промойте большим количеством воды с мылом. / Носить защитную одежду, защитные очки и перчатки. / При попадании в глаза: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если они есть и если это легко сможете сделать. Продолжить промывание глаз. / Если раздражение глаз не проходит: обратиться за медицинской помощью / Удалить содержимое и контейнер в соответствии с местными правилами-законодательством.

### **Защита:**

Рекомендуем использование полумаски для лица с фильтром A1.

### **Хранение:**

- при комнатной температуре
- в хорошо проветриваемом помещении
- подальше от солнечного света
- вне досягаемости детских рук.

### **Гарантия:**

Наши письменные, устные или практические инструкции по применению обоснованы на нашем опыте и тестированиях, поэтому могут быть не обязательными. В связи с тем, что мы не контролируем применение и переработку, ответственным является потребитель.



Potrebno upoštevati navodila za uporabo / Consult instructions for use / Bitte beachten Sie die Bedienungsanleitung / Consultar las instrucciones de uso / Potrebno poštivati uputstva za upotrebu / Vodete se po upatstvoto za upotreba / Необходимо учитывать инструкции по применению / Viz návod k použití / Қолдану бойынша нұсқаулықты ескеру қажет / Consultati instructiunile de folosire / Konsultohuni me udhëzimet për përdorim / Συμβουλευτείτε τις οδηγίες χρήσης



Uporabno do / Use by / Gültig bis / Usar antes / Upotrijebiti do / Рок на употреба до / Использовать до / Použití / Дейін қолданыңыз / Folosit de catre / Përdorimi sipas / Χρήση με



Kontrolna številka / Batch code / Seriennummer / Numero de serie / Serijski broj / Серијски број / Серийный номер / Seriové číslo / Сериялық нөмір / Codul lotului / Kodi i grupit (grumbullit) / Κωδικός παρτίδας



Kataloška številka / Catalogue number / Katalognummer / Numero de catalogo / Kataloški broj / Каталогски број / Каталогный номер / Katalogové číslo / Каталогтық нөмір / Numarul de catalog / Numri i katalogut / Αριθμός καταλόγου



Proizvajalec / Manufacturer / Hersteller / Fabricante / Proizvođač / Производител / Производитель / Výrobce / Өндіруші / Producator / Prodhuesi / Κατασκευαστής



Datum proizvodnje / Date of manufacture / Herstellungsdatum / Fecha de fabricacion / Datum proizvodnje / Датум на производство / Дата изготовления / Datum výroby / Өндірілген күні / Data fabricatiei / Data e prodhimit / Ημερομηνία κατασκευής



Hraniti zaščiteno pred sončno svetlobo / Keep away from sunlight / Geschützt gegen Sonnenlicht halten / Čuvati odvojeno od sunčeve svjetlosti / Хранение -вдали от солнечного света / Чувајте го подалеку од сончева светлина / Uchovávejte mimo dosah slunečního záření / Mantener alejado de la luz solar / Күн жарығынан ұзақ сақтаңыз / A se tine departe de lumina soarelui / Mbani larg nga rrezet e diellit / Κρατήστε το μακριά από ηλιακή ακτινοβολία