

hatho





ThermoPol Set

Набор для 3-х ступенчатой полировки термопластичных зубных протезов.

1. Быстрая и простая предварительная полировка с Multi-Layer brush (арт. 4280) и пастой Polistar Lintygrey (арт. 313168);
2. Эффективная полировка до блеска с COSIMA Soft buff (арт. 869 100/14) и кремом Polistar Cream (арт. 313200);
3. Максимальный блеск с MIRA Polishing Buff (арт. 868 4" x50 H) и пастой Polistar Pro Pink (арт. 313196).



- 1x Polistar Lintygrey 90g
- 2x 4280
- 1x Polistar Cream 90g
- 1x 869 100/14
- 1x Polistar Pro Pink 150g
- 1x 868 4" x50 H





Предварительная полировка с ThermoPol Set

1

1. Присоедините к полировальному аппарату щетку HATHO Multi-Layer brush (арт. 4280);
2. Отрегулируйте низкую скорость 1.800 об/мин;
3. Для заполнения многослойной щетки дополнительным полирующим компонентом, держите брусок HATHO Polistar Lintygrey(паста для предварительной полировки) (арт. 313168) напротив вращающейся щетки приблизительно 2 секунды;
4. Используйте заполненную щетку, чтобы равномерно полировать поверхности термопластичных протезов в течение приблизительно 3 -4 минут до достижения полной гладкости;
5. Закончите первый этап, как обычно, очисткой изделия.





Полировка до блеска с ThermoPol Set

2

1. Установите полировальный круг HATHO COSIMA Soft Polishing Buff (арт. 869 100/14) на аппарат;
2. Отрегулируйте аппарат до низкой скорости 1.800 об/мин;
3. Нанесите примерно 5 мм крема HATHO Polistar Creme (арт. 313200) на прошедший предварительную полировку протез;
4. Аккуратно и равномерно полируйте поверхность протеза приблизительно 3-4 минуты пока не пропадут все точечные метки;
5. Завершите второй этап, как обычно, путем очистки обрабатываемого изделия.





Максимальный блеск с ThermoPol Set

3

1. Закрепите полировальный круг HATHO MIRA Polishing Buff (арт.868 4" x50 Н) в аппарат;
2. Отрегулируйте аппарат до низкой скорости 1.800 об/мин;
3. Заполните полировальный круг компонентом, держа брусок HATHO Polistar Pro Pink (паста для максимальной полировки) (арт. 313196) напротив вращающегося круга около 2 секунд;
4. Аккуратно и равномерно полируйте поверхности протеза приблизительно 3-4 минуты до тех пор, пока он не приобретет максимальный блеск и блестящий внешний вид;
5. Завершите третий этап, как обычно, путем очистки обрабатываемого изделия.





AcryPol Set

Набор для полировки акриловых зубных протезов.

Включает Ideal-Multi-Layer brushes (арт. 9280), Microfiber-Leather polishing buff (арт. 520 100/7), fine cotton buff (арт. 156 80 HS) и брусок Polishing Beige (арт. 313167), собранные вместе для максимального блеска акриловых протезов.



2x 9280
1x 520 100/7
1x 156 80 HS
1x Polistar Beige 85g





COSIMA Soft buff
(арт. 869 100/14)



MIRA Polishing Buff
(арт. 868 4" x50 H)



Multi-Layer brush
(арт. 4280)



Fine cotton buff
(арт. 156 80 HS)



Ideal-Multi-Layer brush
(арт. 9280)



Microfiber-Leather polishing buff
(арт. 520 100/7)



Крем и паста



Polishing Beige
(арт. 313167)



Polistar Cream
(арт. 313200)



Polistar Lintygrey
(арт. 313168)



Polistar Pro Pink
(арт. 313196)

